

Medioplast PT-System

Ett specialdesignat bord för
ergonomisk provtagning



PT-bordet är utvecklat för att uppfylla användarnas krav på en funktionell, individuellt anpassningsbar och ergonomisk riktig arbetsmiljö vid provtagning.

Alla PT-bord levereras kompletta, färdigmonterade och klara för användning.
För att kunna utnyttja PT-systemet alla fördelar läs igenom instruktionen innan du börjar använda bordet.

Tillverkare: Kalsebo Mekaniska Verkstad

PT-BORD



Art.nr.	Beskrivning
PT4040EL	Provtagningsbord med 2 st 40 cm breda sidoskivor
PT4060EL	Provtagningsbord med 1 st 40 cm (vä) och 1st 60 cm sidoskiva (hö)
PT6040EL	Provtagningsbord med 1 st 60 cm (vä) och 1st 40 cm sidoskiva (hö)
PT6060EL	Provtagningsbord med 2 st 60 cm breda sidoskivor

TILLBEHÖR PT-BORD

Med dessa tillbehör håller du PT-bordets ytor fria för provtagningsutrustningen.

Art.nr.	Beskrivning
PT3000	Extra elben som måste monteras under vinkelskiva för stabilitet.
PT6100	PT-Vinkelskiva 35 x 60 cm, för högermontage, passar 40 cm skiva
PT6110	PT-Vinkelskiva 35 x 60 cm, för vänstermontage, passar 40 cm skiva
PT6105	PT-Vinkelskiva 55 x 60 cm, för högermontage, passar 60 cm skiva
PT6115	PT-Vinkelskiva 55 x 60 cm, för vänstermontage, passar 60 cm skiva
PT6050	PT-Hylla med vikarm, komplett med 8 lådor
PT6080	PT-Kanylburkshållare, med höjdställning
PT6090	PT-Avfallskorg, med höjdställning
PT7002	PT-Skärmarm för LCD skärm och etikettskrivare. Inställbar.
PT6160	Extra avlastningskudde för axel, höger
PT6160VÄ	Extra avlastningskudde för axel, vänster
PTVENP	Arm-venprovsningsstöd
PT9006	PT-skrivarhylla med fäste för skärmarm 35 mm
PTVENS-2	Gummimatta till venprovtagning



Tillverkare: Kalsebo Mekaniska Verkstad

Användarinstruktion

1. Elmanövrerad höjdjustering

Alla PT-bord är elmanövrerade – borden justeras i höjddled med hjälp av knapparna på manöverpanelen: Två arbetshöjder kan förprogrammeras.



↑ - Höjdjustering uppåt av bordet

↓ - Höjdjustering nedåt av bordet

Om bordet inte kan höjas eller sänkas – gör en nollställning genom att trycka ner bordet ända ned i botten med pil ned knappen. Håll sedan nedåt-

knappen intryckt i 20 sek. *Notera – rätt arbetshöjd uppnås då armbågar/underarmar kan stödjas mot bordskivan.*

2. Justering av armstödet

Armstödet stödvinkel är justerbart 15-35 grader för att individuellt kunna anpassas till rätt insticksinkel oavsett patienters längd. Rätt stödvinkel uppnås genom att lyfta armstödet sakta och placera vinkelmattan under armstödet i rätt position och i lämpligt spår i den räfflade gummimattan.

3. Monteringsanvisning – tillbehör

PT-Hyllan

Montera axelfästet runt bordskivans kant. Placera fästet på bordskivans främre ytterkant/sidokant, dra åt skruvhandtaget ordentligt. Trä på vinkelarmen genom att trä rörfästet över axelfästet. Placera plastbackar i hyllstativet genom att pressa backen övre kortsida över hyllstativets hyllplan. Hyllan är justerbar i höjddled ca 30 cm. Frigör låsringen (svart skruvhandtag) som sitter runt fästets axel – höj och sänk axeln till önskad nivå – drag åt låsringen och skruvhandtaget ordentligt.



PT-Kanylburkshållare

Placeras vid kortsidan eller vid bordskanten till höger eller vänster om provtagaren. Skruva fast stativbalken med de fyra medföljande skruvarna, under bordskivan, parallellt med bordskanten. Häkta fast kanylburkshållaren i stativbalkens infästningshål på lämplig höjd. Kanylburkens överkant skall komma i nivå med bordskivan. Skruva åt de två skruvarna på kanylburks-hållarens infästning mot stativbalken.



PT-avfallskorg

Placeras på bordets kortsida, höger eller vänster. Stativbalken monteras enligt ovan. Häkta fast upphängningsarmen på stativbalken och lås genom att skruva åt låsskruvarna på infästningen mot stativbalken. Häng upp avfallskorgen på upphängningsarmen.



5. Rengöring

Provtagningsbordets ytor har en laminerad MDF board som tål rekommenderade ytdesinfektionsmedel. Stativets ytor är lackade med en miljövänlig pulverlack som tål samma medel. Knappsatsen till det höj och sänkbara stagvitet bör endast torkas av med en fuktad trasa.

Tillverkare: Kalsebo Mekaniska Verkstad